

# Consigli per la cura

Cuscino ortopedico wenaCel® comfortPlus\*



Simboli per la cura:



**Per poter godere a lungo del vostro prodotto Wenatex, vi preghiamo di osservare i seguenti consigli per la cura:**

- La federa del cuscino è **lavabile a 60°C**.
- Utilizzare il **detersivo wenaCare® sviluppato appositamente per i prodotti Wenatex** (o un altro detersivo liquido delicato senza sbiancanti ottici). Si prega di attenersi alle indicazioni di dosaggio riportate sulla confezione.
- **Nota: la federa del cuscino non è adatta all'asciugatrice!**
- **Nota: la fodera del cuscino non è impermeabile.**
- **Attenzione: l'anima in schiuma fredda wenaPur® comfort non va lavata!**

## Consigliamo:

**detersivo wenaCare® per la biancheria da letto**

Da ordinare facilmente online:  
[www.wenacare.com](http://www.wenacare.com)



## Il nostro servizio:

Al telefono:  
**+39 0472 060 800 (IT)**  
 Per e-mail:  
**servizioclienti@wenatex.com**

\* I consigli per la cura valgono anche per il seguente prodotto: cuscino ortopedico wenaCel® sensitive